EASTERN TIME ZONE (GMT-4)

Gebrauchsanweisung

### HAL≣ON

### 3. Führen Sie die Spitze des Sprühkopfes vorsichtig in das obere Nasenloch ein. 4. Drücken Sie den Sprühkopf ganz nach unten, um eine ausreichende Menge

- Lösung freizusetzen. 5. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.
- 6. Schnäuzen Sie die Nase.
- 7. Spülen Sie den Sprühkopf nach jeder Anwendung mit warmem Wasser aus. Teilen Sie das Spray nicht mit anderen Personen, da Infektionen übertragen



### Otrivin Natural Nasenreinigung Sanft 125 ml

**Natural** 

Otrivin Natural Nasenreinigung Sanft ist eine isotone Meerwasserlösung (0,9 % NaCl), die von Natur aus reich an Mineralsalzen und Spurenelementen des Meeres ist. Es reinigt die Nasenhöhlen, spült überschüssigen Schleim und im Schleim enthaltene Verunreinigungen wie Krankheitserreger, Allergene und Schadstoffe aus und hilft, die Nase gesund zu halten und sekundären HNO-Infektionen vorzubeugen.

Otrivin Natural Nasenreinigung Sanft hilft, nasale Beschwerden wie Verstopfung und Schleimabsonderung zu lindern, die z.B. durch Erkältungen und Allergien verursacht werden, und die Nasenatmung zu verbessern.

'Außerdem befeuchtet es die Nasenschleimhaut bei Trockenheit.

- Zur täglichen Hygiene der Nasenhöhlen zur Entfernung von Schleim. Krankheitserregern (z. B. Viren, Bakterien), Allergenen (z. B. Pollen, Hausstauballergene), Schadstoffen (z. B. Luftverschmutzung, Tabak), Staub und anderen potenziell schädlichen Partikeln (mechanische Wirkung)
- Zur Linderung von nasalen Beschwerden (z. B. Verstopfung, Schleimabsonderung), verursacht durch z. B. Erkältungen und Allergien, Rhinosinusitis oder nach einer endonasalen Operation
- · Zur Befeuchtung der Nasenschleimhaut und Linderung von Trockenheit

Otrivin Natural Nasenreinigung Sanft kann auch in Kombination mit abschwellenden topischen Arzneimitteln verwendet werden, vorzugsweise unmittelbar vor deren Anwendung.

Geeignet während der Schwangerschaft und Stillzeit.

### Zusammensetzung:

Meerwasser 28 %, gereinigtes Wasser 72 % (1 ml Lösung enthält 0,28 ml Meerwasser), entspricht 0,9 % Natriumchlorid (NaCl). Frei von Konservierungsstoffen oder anderen chemischen Zusätzen. 100 % natürlich.

Inertes Treibgas (Stickstoff), nicht in Kontakt mit der Lösung.

Spray mit weißer Düse. Normales Spray, geeignet für alle, einschließlich Babys.

### **Empfohlene Dosierung:**

Ab 0 Jahren: 1-2 Sprühstöße in jedes Nasenloch, 2- bis 3-mal täglich.

Ab 6 Jahren: 1-3 Sprühstöße in jedes Nasenloch, 2- bis 4-mal täglich.

## Nebenwirkungen:

Zu Beginn kann ein stechendes Gefühl oder eine vorübergehende Reizung auftreten.

Bei Überempfindlichkeit gegen Meerwasser nicht verwenden. Nur zur Anwendung in der Nase. Nach Ablauf des Verfalldatums nicht verwenden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

## Aufbewahrungshinweise:

Unter 25 °C lagern. Der Inhalt steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. Vor Sonnenlicht und Hitze schützen. Nicht durchstechen oder verbrennen.


## Gebrauchsanweisung:

## **Erwachsene & Kinder:**

- 1. Entfernen Sie die Schutzkappe und setzen Sie den Sprühkopf auf die
- 2. Beugen Sie sich über ein Waschbecken und neigen Sie den Kopf sanft zur

### **Babys & Kleinkinder:**

- 1. Entfernen Sie die Schutzkappe und setzen Sie den Sprühkopf auf die
- 2. Legen Sie das Baby auf den Rücken, neigen Sie den Kopf sanft zur Seite und halten Sie es in dieser Position.
- 3. Führen Sie die Spitze des Sprühkopfes vorsichtig in das obere Nasenloch ein.
- 4. Drücken Sie den Sprühkopf ganz nach unten, um eine ausreichende Menge Lösung freizusetzen.
- 5. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.
- 6. Bringen Sie das Baby wieder in eine aufrechte Position, lassen Sie die Lösung abfließen und wischen Sie die Nase ab.
- 7. Spülen Sie den Sprühkopf nach jeder Anwendung mit warmem Wasser aus. Teilen Sie das Spray nicht mit anderen Personen, da Infektionen übertragen werden können.

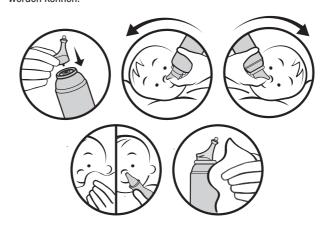

Otrivin Natural Produkte sind Medizinprodukte, die den Anforderungen der Richtlinie 93/42 der Europäischen Gemeinschaft entsprechen.



Gerolymatos International S.A. 8 Asklipiou St. 14568 Kryoneri, Athen Griechenland

## Vertrieb:

Haleon - Gebro Consumer Health GmbH 6391 Fieberbrunn Österreich Tel.: 0800 070 259 E-Mail: haleon@gebro.com

125 ml







Marken sind Eigentum der Haleon Unternehmensgruppe oder an diese lizenziert. © 2024 Haleon oder Lizenzgeber

MM

# **Technical Specifications** 210 x 297 mm Size of the leaflet: 210 x 38 mm Size of the folded leaflet:

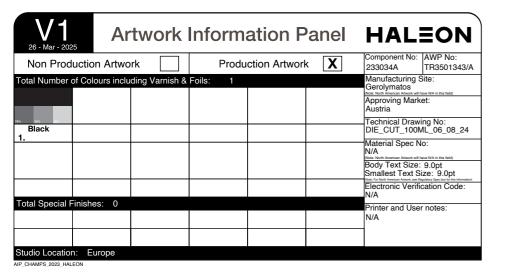

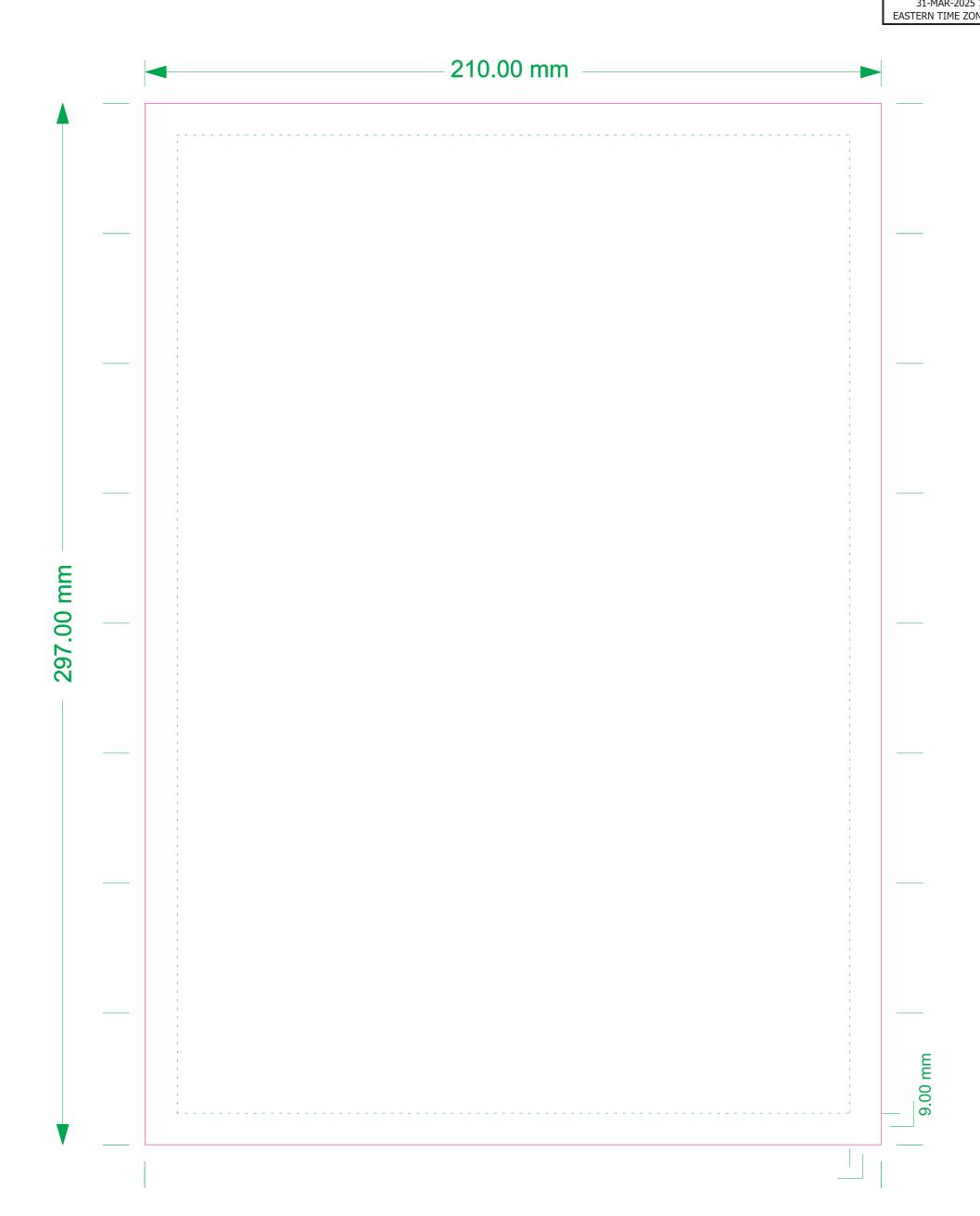

Technical Specifications	
Size of the leaflet:	210 x 297 mm
Size of the folded leaflet:	210 x 38 mm

Non Production Artwork  Total Number of Colours including Varnish & Foils:  1    Manufacturing Site: Gerolymatos   Mary Market: Austria   Material Spec No: NI/A	V 1 26 - Mar - 2025	Artwork	nel	HALEON	
Gerolymatos  Matter beth Amount means with her to the tell Approving Market: Austria  Technical Drawing No: DIE_CUT_100ML_06_08_24  Material Spec No: NA Material Spec No: NA Material Spec No: Smallest Text Size: 9.0pt Smallest Text Size: 9.0pt Smallest Text Size: 9.0pt Smallest Text Size: 9.0pt Total Special Finishes: 0  Printer and User notes: N/A	Non Production	on Artwork	Production Artwork	X	1 '
	Black 1.  Total Special Finish	es: 0	Foils: 1		Gerolymatos  White brain American de March 10 has faled Approving Market: Austria  Technical Drawing No: DIE_CUT_100ML_06_08_24  Material Spec No: N/A  Material Spec No: N/A  Material Spec No: N/A  Material Spec No: N/A  Body Text Size: 9.0pt  Smallest Text Size: 9.0pt  Smallest Text Size: 9.0pt  Smallest Text Size: 9.0pt  N/A  Printer and User notes: